

MED ATHRODESE BEDIENUNGSANLEITUNG



GUTE ARBEIT.



Höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Innenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Breitenverstellbare Armlehne:

Hebel an der Unterseite nach unten klappen um die Armlehne in der Breite zu verstellen.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des rechten Drehhebel.

SitzhöhenEinstellung:

Den Hebel vorne rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Höhenverstellbare

Rückenlehne:

Rückenlehne anheben und über das Raster in die gewünschte Höhe ziehen. Zum Herunterstellen die Lehne in die oberste Position ziehen, von dort in die unterste Ausgangsposition gleiten lassen und dann in die gewünschte Höhe nach oben bewegen.

Athrodesensitz:

Um die vorderen Sitzflächenhälften zu neigen jeweils links oder rechts das Rad unterhalb des Sitzpolsters öffnen und die Sitzfläche in die gewünschte Position neigen.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Drehhebel links im Uhrzeigersinn drehen.

SitztiefeEinstellung:

Den Hebel vorne links nach oben gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

